



Andro-Penis®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

extender.com.ua

extender.com.ua

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1.- ОПИСАНИЕ

Andro-Penis® это **аппарат одобренный Медиками всего мира**, он имеет **сертификат CE 1 класса**, выданный Санитарными органами Европейского Союза.

Andro-Penis® состоит из кольца на пластмассовой основе, двух металлических палочек с несколькими внутренними пружинами и одного пластмассового предмета с силиконовой лентой. Пластмассовые части состоят из POM. Силиконовая лента из материала применяемого в медицине. Металлические палочки изготовлены из латуни с тонким оберточным слоем из никеля и позолочены (Andro-Penis® Gold), пружины из тонкой стали и оси из хирургического алюминия.

СОСТАВ(рис.1): 1: кольцо на пластмассовой основе; **2:** круглый предмет с отверстием; **3:** палочка с резьбой; **4:** стягивающий болт с внутренней резьбой; **5:** металлическая трубка; **6:** гвоздь; **7:** пружина; **8:** стопорный болт для пружины; **9:** большая ось 4 см(1.6"); **10:** средняя ось 2 см (0.8"); **11:** маленькая ось 0.5 см(0.2"); **12:** минимальная ось 0.3 см(0.1"); **13:** внешняя опора пластасы; **14:** силиконовая лента; **15:** предохранительная подушечка(Andro-Top).

Примечание: Между частями 3 и 5 необходимо капнуть немного масла, для их лучшего скольжения (см. Смазка)

2.- МОДЕЛИ ANDRO-PENIS®

-Andro-Penis®: для пениса длиной от 10 см в эрегированном состоянии

-Mini-Andro-Penis®: для пениса длиной от 6 до 10 см в эрегированном состоянии

-Andro-Penis® Gold (для людей с аллергией на никель): для пениса длиной от 10 см в эрегированном состоянии

3.- НАЗНАЧЕНИЕ :

Удлинение пениса и коррекция его изгиба без хирургического вмешательства. Болезнь Peyronie. Курс лечения после операций по удлинению пениса, его хирургической корректировке или реконструкции

Противопоказания: больные диабетом, не наблюдающиеся у врача.

Не вызывает побочных эффектов, при условии выполнения указаний инструкции.

4.- РАЗМЕРЫ ВАШЕГО ПЕНИСА

В первую очередь измерьте длину и периметр пениса в **спокойном состоянии**, затем длину и периметр в состоянии **эрекции**. (Рис. 3 и Рис. 4). Запишите эти данные в таблице- ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ (Рис.14)



5.- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ANDRO-PENIS®

Начальный размер аппарата Ando-Penis® - 9 см и Mini-Andro-Penis® - 7 см. Размер аппарата измеряется от внешнего края кольца до верхнего края металлической оси (рис.6, INITIAL). Для расчета размера, который должен иметь персональный Andro-Penis®, необходимо отнять 4 см от длины Вашего пениса в состоянии **эрекции** (см. пример); если пенис имеет изгиб или искривление, необходимо отнять 5 см.

Пример: 15,7см - 4 см = 11,7 см — Персональный размер Andro-Penis = 11,7 см.

Затем необходимо подготовить аппарат для того, чтобы его размер соответствовал проведенным расчетам. Сначала уберите верхнюю пластмассовую опору (деталь 13), потянув её вверх. (рис. 5) После этого добавьте на конец детали 8 (рис. 6) столько осей, чтобы подготовить необходимые размеры персонального Andro-Penis®. (рис.6; PERSONAL)

Следующие оси, которые могут быть добавлены: большая ось размером 4 см (деталь 9); средняя ось размером 2 см (деталь 10); маленькая ось размером 0,5 см (деталь 11) и минимальная ось размером 0,3 см (деталь 12). (см. Пример)

Персональный размер 11,7см = Andro-Penis Начальный (9см) + деталь 10 (2см) + деталь 11 (0,5см)

Если персональный размер, который был рассчитан, является меньше, чем начальный размер аппарата, то начните курс лечения с аппарата начального размера.

6.- АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД



fig. 5

Дни	Размер Andro-Penis®	Применение
1 ^я -5 ^я день	Персональный размер Andro-Penis®	3 часа / день
6 ^я -10 ^я день	Добавить на 6 ^я день деталь 11 (маленькая ось 0,5 см) с каждой стороны	6 часов / день
11 ^я -15 ^я день	Добавить на 11 ^я день деталь 11 (маленькая ось 0,5 см) с каждой стороны	8 часов / день

7.- РАЗВИТИЕ

Вы можете выбрать один из двух следующих способов:

ОБЩИЙ СПОСОБ (Рекомендовано)	Добавляйте каждые 7 дней по детали 11 или по маленькой оси 0.5 см с каждой стороны	9 часа / день
ОСОБЫЙ СПОСОБ	Добавляйте каждые 3 дня по детали 11 или по маленькой оси 0.5 см с каждой стороны. Для профессий с большими физическими нагрузками	4 часа / день

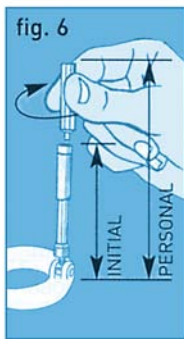


fig. 6

Нет необходимости носить аппарат непрерывно. Вы можете сделать необходимый перерыв любой продолжительности и массаж пениса. Когда Вы примените четыре одинаковых детали или 4 маленьких оси размером-0.5 см, Вы должны заменить их на одну деталь 10 (средняя ось размером 2 см) (см. рис. 2)

Начиная с **третьего месяца применения аппарата**, Вы должны постепенно увеличивать его размеры, то есть, каждые 10 или 15 дней добавлять одну деталь 11

(маленькая ось 0,5 см)

Вы можете добавлять по частям, например, в первый день добавить деталь 12 (минимальная ось 0,3см), а затем через несколько дней заменить её на деталь 11 (маленькая ось 0,5 см).


Использование аппарата по особому способу предусматривает более медленные и менее заметные результаты.

8.- ПОЛОЖЕНИЕ ANDRO-PENIS® НА ПЕНИСЕ

Возьмите **силиконовую ленту** (деталь 14) и вставьте внутрь в трубку (Andro-Top). Её применение является обязательным. Обмотайте трубку бинтом. (Рис. 7) В спокойном состоянии пениса, уберите всю кожу с крайней плоти в сторону тела, закрывая при этом головку (Рис 8). Затем оттяните за пределы пениса, для того чтобы его удлинить. После этого вставьте концы ленты в отверстия в верхних пластмассовых опора (деталь 13), так, чтобы лента образовала петлю.

Вставьте пенис в кольцо на основании (деталь 1), так, чтобы головка опиралась свободно на отверстие в верхней опоре (деталь 13).

Положите **левую руку** на верхнюю опору (деталь 13) и **надавите** аппарат на себя, для того чтобы его немного уменьшить (Рис 9).

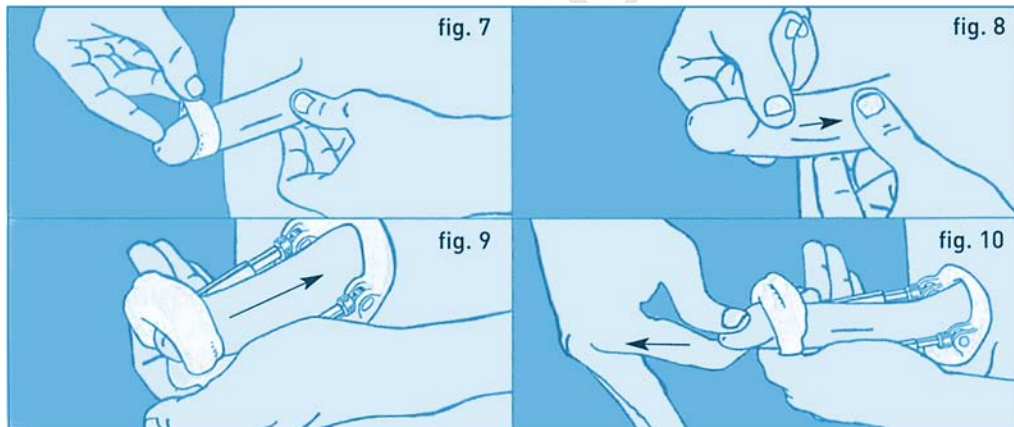


Продолжая надавливать левой рукой, правой освободите пальцы внутри силиконовой петли и вытащите головку из петли так, чтобы её край находился сверху ленты. (Рис 10). Положите большой палец левой руки на уздечку, для того чтобы поддержать головку. Попытайтесь уменьшить петлю, с головкой находящейся внутри её, чуть потягивая за каждый конец силиконовой ленты (Рис 11).

Медленно растяните кожу по направлению к телу вперед и назад для того, чтобы избежать образования складок и морщин.(Рис 12).

Головка должна быть зажата петлёй так, чтобы она не выпадала, но и не болела Освободите левую руку и затем осторожно вставьте концы ленты в щели в верхней опоре(деталь 13). Зажмите, но не растягивайте вниз, для того, чтобы избежать повреждений уздечки.(Рис 13).

Проверьте, чтобы не было ни складок, ни морщин, и, если они еще остались, растяните кожу по направлению вниз, вперед и назад, избегая повреждений.

Для получения наглядной информации смотрите видео фильм на web-странице: www.andromedical.com (на английском языке) или на компакт-диске CD-ROM.

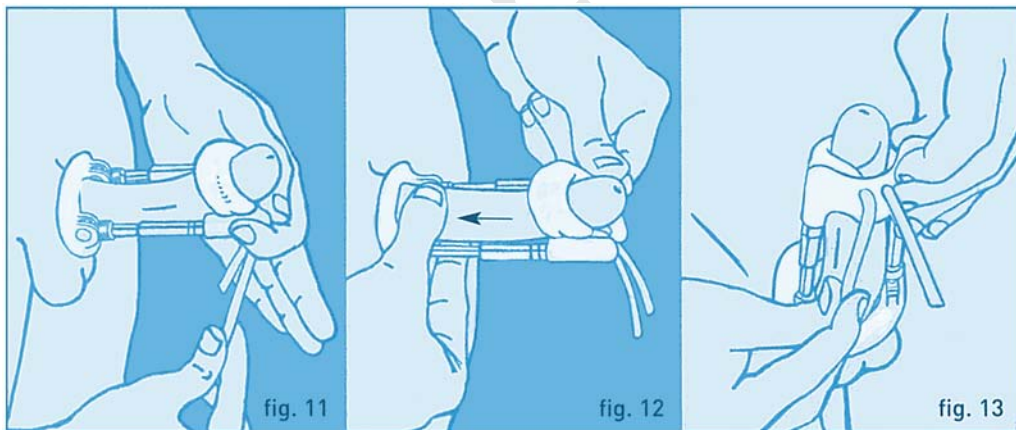

9.- ПРИМЕНЕНИЕ ANDRO-PENIS®

Будьте терпеливы и постоянны в применении. Это - залог Вашего успеха.

Для того, чтобы привыкнуть, оденьте и снимите аппарат 10 раз подряд.

Через каждые **два часа** рекомендуется снимать его на несколько минут, для того, чтобы отдохнула ткань. На последующих стадиях необходимо отдыхать через каждые полтора часа. В течении отдыха делайте легкий массаж пениса.

Рекомендуется носить аппарат **направленным вверх**. Используйте свободное, не стесняющее движений, нижнее бельё . Через каждые четыре дня необходимо мыть аппарат с мылом и водой.

Если Вы не надевали аппарат в течении 0,5–1 месяца, Вы должны начать с размера на 1 см меньше, чем был аппарат, и затем через 5 дней увеличьте размер на 0,5 см. После этого через каждые 5 дней увеличивайте размер на следующие 0,5 см. Потом можете продолжать увеличение с размеров, на которых была прервана терапия.

10.- СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

КОРРЕКЦИЯ ИЗГИБА: Аппарат должен быть установлен с противоположной стороны изгиба. Рекомендуется применять аппарат в течении 6-8 месяцев, после чего достигается около 70% результата. Общее увеличение размера небольшое. Наибольший рост достигается со стороны прогиба. Применение по общему способу.

БОЛЕЗНЬ PEYRONIE: Смотрите корректировки изгибов. Необходимо комбинировать применение аппарата с другими медицинскими средствами, кремами и таблетками, в соответствии с назначением врача.

ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИСЕ: Следуйте назначениям Вашего врача и по прошествии 3 или 4 недель со дня операции можете начинать применение аппарата. Применение только по общему способу.

ANDRO-PENIS С ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ: С применением тестостерона увеличение происходит быстрее и более заметно. Терапия должна проводиться под наблюдением врача. Необходимо сделать анализы для обнаружения каких-либо заболеваний, запрещающих применение гормонов. Для более подробной информации смотрите: www.andromedical.com (информация на русском языке доступна на сайте www.extender.com.ua)

ВАРИКОЦЕЛЕ: Опоясать кольцо основания подушечками через верхнюю и нижнюю дугу.

11.- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо снимать аппарат для того, чтобы мочиться. Запрещается применять аппарат после применения алкоголя или наркотиков. А также во время выполнения тяжелых физических упражнений или занятий спортом. Если у Вас наступила эрекция во время ношения аппарата и появилось ощущение сжатости, не волнуйтесь, это нормально. При неудобствах, болях, посинении или онемении, снимите аппарат и сделайте массаж пениса. Таким образом исчезнут неудобства, и пенис вернется в свое нормальное состояние.

Если возникли неудобства внизу головки, необходимо положить на эту часть хлопковую ткань или бинт.

Когда снимете аппарат, почувствуете небольшие неудобства и зуд. Это не должно Вас волновать, это нормальное явление, таким образом расслабляется ткань, которая находилась под небольшим напряжением.

Возможно возникновение небольших неудобств через каждые два часа. Не волнуйтесь. Это означает, что тканям необходимо расслабиться; надо снять аппарат и сделать небольшой массаж пениса. Достаточно сделать перерыв на 2 минуты и затем снова надеть аппарат. В течение периода ношения аппарата не должны наблюдаться никакие неудобства. Однако, бывают дни, когда без всякой причины возникают неприятные ощущения. Не волнуйтесь, на следующий день скорее всего Вы будете носить его как обычно.

Если появятся белые мешочки на головке, не волнуйтесь - это реакция жидкости на немного сдавленное состояние головки. Они исчезнут, как только Вы сделаете небольшой массаж головки пениса и немного отпустите ленту.

Если появляются какие-либо раны, язвы или у Вас наблюдается какая-либо половая болезнь, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА** до тех пор, пока не вылечитесь. Если появятся белые точки на головке, необходимо посетить врача, хотя это возможно могут быть наросты. Необходимо избегать трогать пенис грязными руками.

ВАЖНО: Использование медикаментов для улучшения роста волос, антидепрессантов, снотворных, успокаивающих и расслабляющих средств может уменьшить рост пениса.

12.- КРЕМЫ

Рекомендуется приобрести в профилактических целях:

Крем против раздражений: его можно заказать в аптеке или купить уже готовый. Крем должен содержать экстракт азиатского лютика в кол-ве - 0.010 гр, Сульфат Неомицина в кол-ве 0.0035 гр и Эксципиент в кол-ве -1 гр. Проконсультируйтесь у своего врача. Способ применения:

- **в случае эрозии:** наносить крем каждую ночь вплоть до выздоровления. Днем можете применять аппарат.

- **в случае постоянных эрозий:** наносить крем каждую ночь и днем применять его в распычатом виде.

Затягивающий крем: его можно заказать в аптеке или купить уже готовый. На каждые 100гр он должен содержать: оксид цинка - 27гр, стандартное масло печени трески - 0,5гр, (содержащее 25.000 U.I. витамина А и 2.000 U.I. витамина D) и эксципиент в кол-ве - 100гр. Проконсультируйтесь у своего врача.

- **Если есть раны или язвы:** запрещается применение аппарата в течении 4 дней. В течение 2-х первых дней наносить крем против раздражений 3 раза в день и 2 последующих дня наносить затягивающий крем в небольших количествах 2 раза в день.

Крем против воспалений: если появится воспаление у основания пениса или на лобковой части, нанесите крем против воспалений на ночь. Проконсультируйтесь у своего врача.

Увлажняющий крем: если возникнут какие-либо неудобства в области пениса, сделайте массаж с помощью увлажняющего крема, производя легкие растягивания в течении 5 минут на ночь.

Для уменьшения риска каких-либо раздражений или воспалений рекомендуем приобретать **Andro-Penis® Gold** (с золотым напылением)

Заказать Andro-Penis® Gold в Украине вы можете на сайте: www.extender.com.ua

ANDROMEDICAL GUARANTEES

The Andre-Penis® has several guarantees certifying that you have purchased a medical device that meets the necessary standards of quality and efficiency for correct use (see the guarantee icons below).

In order to validate the 1 year manufacturers guarantee and the 60 days money back guarantee (minus post and packaging and administration costs), please fill out the form and send it to Andromedical, within one month of purchase.

If the product or any part thereof are found to be defective within a year of purchase, or if you wish to return the product within sixty days of purchase, please send us the said part or the product together the aforementioned guarantee to the address provided.

Important: ALWAYS include the lot number and serial number of the product on the form and details of the shop or distributor where the product was purchased.

We sincerely hope that you are satisfied with this product.

OUR GUARANTEES

ISO 9001:2000
Quality Management
System certified
(Q.M.S. certified)



ISO 13485:2003
Medical Devices
Certified

Medical Device
Type 1 (93/42/
CE)



Manufacturing
License (5
144-PS)



Guaranteed
Scientifically
Tested



60-Day Money
Back
Guarantee



One Year
Manufacturer's
Guarantee

I have been perfectly informed of the possible risks to my health if I do not use the product accurately and according to the instruction manual. I know that if I am very sensitive in the mucous membrane of my penis, using the product can cause erosions, wounds, and also ulcers in the base also groove of glans penis. I must then suspend usage of the device until this is completely cured. No secondary effects should occur.

www.andromedical.com

